

Hızlı Dezenfeksiyon

CLEANISEPT® SPRAY

Kullanıma Hazır Alkolsüz Hızlı Yüzeysel Dezenfektan

- Aldehit, fenol ve alkol içermez
- Akrilik yüzeyler için uygundur
- Kısa temas süresine sahiptir
- Yüksek temizlik gücüne sahiptir
- Özellikle alkole hassas yüzeyler için uygundur



Ürün Özellikleri

CLEANISEPT SPRAY, aldehit, fenol ve alkol içermez. Tıbbi cihaz yüzeyleri için alkol içermeyen hızlı dezenfeksiyonda kullanılır. Çok iyi yağ çözme özelliğine sahip olup, toksisitesi çok düşüktür.

Kullanım Alanları

CLEANISEPT SPRAY toksisitesi çok düşük olan ve parfüm içermeyen bir preparattır. Alkole hassas bebek odaları, küvözler gibi akrilik yüzeylerde, yoğun bakım ve reani masyon servislerindeki non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda, vajinal ve karın bölgesinin muayene nesinde kullanılan ultrason problemlerinin dezenfeksiyon ve temizliği için kullanılır.

Kokusuzdur, bu sebeple özellikle dezenfeksiyon işlemi sırasında koku oluşumu istenmeyen alanlar için uygundur. Çok kısa sürede etki edebilme özelliğinden dolayı alkol içeren hızlı dezenfektanlara alternatif olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

CLEANISEPT SPRAY'ı tıbbi cihaz yüzeylerine en az 30 cm mesafeden tamamen ıslanmaya kadar püskürtün, etki süresinin geçmesinden sonra tek kullanımlık temiz bir bezle siliniz.

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süreleri			30 sn.	1 dak.	2 dak.
Bakteri ve yeast					
Yüzeysel dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakteriyel, yeastid*	VAH** / EN 16615	Mekanik etki, kirli koşul		•	
Zarflı virüs					
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil	•		
	EN 14476	Temiz koşul	•		
Virüs					
Papova/SV40 virus	EN 14476	Kirli koşul			•
Rotavirus	RKI/DVV		•		

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

** VAH listesinin 5 dakikalık sütununda listelenmiştir.

Temizleme makinaları ve mobil aletler ile kullanımı:

Püskürterek kullanılır.

İçerik

CLEANISEPT SPRAY, CLEANISEPT TB'den %7,5 oranında DR. SCHUMACHER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından seyreltilerek ambalajlanmıştır.

100 g Cleanisept® Spray;
0,25 g didesildimetilamonyum klorür.
0,5 g alkilbenzildimetilamonyum klorür

içerir.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Uyarılar

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Çevreye verilmesinden kaçının. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. İçeriği/konteyneri tehlikeli atıklarla il-



CLEANISEPT® SPRAY

Kullanıma Hazır Alkolsüz Hızlı Yüzey Dezenfektanı

güçlü yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- CLEANISEPT SPRAY 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
CLEANISEPT SPRAY	Şişe	1L	12	00-TR2045-010
	Bidon	2,5L	3	00-TR2045-010
Uygulama yardımcıları	Spray Başlığı 1L	1L	1	F5500

Dezenfektanları güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün formu ve güvenlik bilgi formunu okuyun.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

