

CLEANISEPT® WIPES

Hızlı Dezenfeksiyon İçin Alkol İçermeyen Mendiller



Alkolsüz, fenolsüz, aldehitsiz
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Dezenfeksiyon çözeltisi DGHM/VAH ve
DVG listesinde kayıtlıdır.

CE 0482

Dezenfeksiyon Mendilleri

Ürün Özellikleri

Cleanisept® Wipes Likit dezenfektan çözeltisinin formülasyonu kuarterner amonyum bileşiklerine dayanır.

Cleanisept® Wipes alkolsüzdür, aldehit ve fenol içermez. Toksikitesi çok düşüktür, mükemmel temizlik sağlar.

Cleanisept® Wipes'in PHILIPS, SIEMENS, ESAOTE, SHIMADZU, SONOACE, TOSHIBA, ALOKA, HITACHI ve GE ultrason probu üreticileri tarafından kullanımı onaylanmıştır.

Cleanisept Wipes, medikal uygulamalarda hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir (TRGS 525/540).

Kullanım Alanları

Vajina ve karın bölgesinin muayenesinde kullanılan ultrason problemleri gibi alkole karşı hassas tıbbi cihazların dezenfeksiyonu ve temizliğinde kullanılır. Ayrıca küvezler gibi akrilik yüzeylerde, yoğun bakım ve reanimasyon servislerindeki tıbbi ekipmanların yüzeylerinde kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

Tıbbi cihazları ve yüzeyleri tamamen ıslanmaya kadar silin. Etki süresi geçtikten sonra ihtiyaç duyulursa yüzeyde kalan dezenfektanı tek kullanımlık bir bezle silin. Ultrason problemleri **Cleanisept® Wipes** ile silindikten sonra etki süresinin geçmesinin ardından ultrason probunu yeterli miktarda temiz su ile durulayınız ya da temiz su ile ıslatılmış tek kullanımlık bezle siliniz. Ultrason probunu her bir uygulama öncesi Cleanisept Wipes ile dezenfekte ediniz.

Kutunun içindeki mendil poşetini açın. Bir tane mendili rulodan çekin. Mendil poşetini kutunun içine yerleştirin. Kutu kapağının ortasından rulodan çektiğiniz mendili geçirin, dışarı çekin ve kapağı kutunun üzerine yerleştirin. Boşalan kutuları yeniden orijinal etiketli CLEANISEPT WIPES mendil paketleri ile doldurunuz.

Bileşimi

Mendillere emdirilmiş **Cleanisept® Wipes Likit** dezenfeksiyon çözeltisinin 100 g'ı;
0,25 g Didesildimetilamonyumklorür
0,5 g Alkil (C12-16) benzildimetilamonyumklorür içerir.

Mendillere 180g Likit dezenfeksiyon çözeltisi emdirilmiştir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Bu bilgi **Cleanisept® Wipes Likit** çözeltisine aittir.
pH değeri, konsantre : 6-8

Antimikrobiyal Özellikleri ve Temas Süreleri

Cleanisept® Wipes Likit dezenfeksiyon çözeltisi;
DGHM/VAH/EN 1276/EN 1650/EN 13697'ye göre(bakterisidal, yeastsidal; kirli koşullar altında): 1 dakika*
*VAH'ın 5 dakika kolonunda listelenmiştir.

Virüsidal (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Influenza, Rota gibi zarflı virüsler: 30 saniye
Papova/Polyoma virüsleri (EN 14476):
2 dakika

CLEANISEPT® WIPES

Hızlı Dezenfeksiyon İçin Alkol İçermeyen Mendiller



Alkolsüz, fenolsüz, aldehitsiz
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Dezenfeksiyon çözeltisi DGHM/VAH ve
DVG listesinde kayıtlıdır.

CE 0482

Dezenfeksiyon Mendilleri

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Dağıtım şekli
100 Mendil'lik Kutu	12 x 1kutu
100 Mendil'lik Refill	12 x 1poşet

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Uyarılar

GÖZLERLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı veya yapması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. İçeriği ve kabını yerel veya ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Dezenfektanları güvenli şekilde kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün bilgi formunu okuyunuz.

Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld-Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

Ruhsatlandırma

*Cleanisept Wipes Liquid çözeltisi DGHM/VAH listesinde dir.

*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.A.Ş
Tire Organize Sanayi Bölgesi İbni Melek OSB mah.
Yol 5 sokak. No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.desomedeuro.com info@desomedeuro.com