

## Dezenfeksiyon Mendilleri

# CLEANISEPT® WIPES MAXI

## Hızlı Dezenfeksiyon İçin Alkol İçermeyen Mendiller

- Pratik dispenseri sayesinde konforlu ve hızlı uygulama sunar
- Kolay ve hızlı etki gösterir
- Özellikle rutin alanlarda orta büyüklükteki yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygundur



### Ürün Özellikleri

CLEANISEPT WIPES MAXI, tıbbi cihazların ve tıbbi envanterin yanı sıra rutin tüm alanlarında her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyonu ve temizlenmesi için mendiller kullanmaya hazırdır. CLEANISEPT WIPES MAXI, daha büyük yüzeylerin dezenfeksiyonu ve temizliği için evrensel ve zaman kazandıran bir uygulama sunar. Çözelti alkolsüzdür ve aldehit ve fenol içermez. Mendiller, yeniden kapatılabilir ve kullanıcı dostu dispenser sayesinde ayrı ayrı çıkartılabilir.

### Kullanım Alanları

**AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca:** Özellikle alkole karşı hassas tıbbi ekipmanların ve her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyonunda ve temizlenmesinde kullanılır.

### Kullanım Şekli

Yüzeyleri tamamen ıslanana kadar CLEANISEPT WIPES MAXI ile silin ve tüm temas süresi boyunca kurumasını bekleyin.

### Kullanım Notları

Açıldıktan sonra raf ömrü: 3 aydır.

### İçerik

100 g solüsyon şunları içerir  
 0,5 g alkil (C12-16) benzildimetilamonyum-klorür,  
 0,25 g Didesildimetilamonyum-klorür.

Etki Spektrumu ve Temas Süresi			30 sn.	1 dak.	2 dak.
<b>Bakteri ve yeast</b>					
Yüzey dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal,yeastisidal.*	VAH**/ EN 16615	Mekanik etki ve kirli koşul		•	
<b>Zarflı virüs</b>					
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil	•		
	EN 14476	Temiz koşul	•		
<b>Zarfsız virüs</b>					
Papova/SV40 viruses	EN 14476	Kirli koşul			•
Rotaviruses	RKI/DVV		•		
<b>Ek test sonuçları</b>					
Bakterisidal	EN 1040			•	
	EN 13727	Kirli koşul		•	
Yeastisidal (C. albicans)	EN 1275			•	
	EN 13624	Kirli koşul		•	

\* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

\*\* VAH listesinin 5 dakikalık sütununda listelenmiştir

### Üretici Onayları

CLEANISEPT WIPES MAXI aşağıdaki üreticilerin ultrason cihazlarını ve ultrason problemleri dezenfekte etmek için onaylanmıştır:

- Aloka GmbH, Meerbusch
- Esaote GmbH, Köln
- Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden
- Philips Medizin Systeme GmbH, Hamburg

- Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg
- Siemens Medical Solutions, Erlangen
- SonoAce GmbH, Marl
- Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen

CLEANISEPT WIPES MAXI aşağıdaki üreticilerin tıbbi cihazlarını dezenfekte etmek için onaylanmıştır:

- Cardinal Health, Deutschland



## Dezenfeksiyon Mendilleri

# CLEANISEPT® WIPES MAXI

### Hızlı Dezenfeksiyon İçin Alkol İçermeyen Mendiller

- Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach
- Schmitz & Söhne, Wickede
- Tomey/Eye Novation GmbH, Bielefeld

#### Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

#### Önlemler ve Tehlikeler

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Çevreye verilmesinden kaçının. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

#### Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

#### Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya  
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444  
www.schumacher-online.com

#### İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi  
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87  
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	Boyut	REF
CLEANISEPT WIPES MAXI	Paket	10 Mendil	54	20 x 22 cm	00-208-T010EXP
	Paket	100 Mendil	6	20 x 22 cm	00-208-T100EXP

Ürünler ve konteyner boyutları başarılı bir ulusal tescile bağlıdır.

Dezenfektanları güvenle kullanın. Kullanmadan önce daima etiket ve ürün bilgilerinizi okuyun.



CE 0482



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

