



Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri

DESCO WIPES

Dispenser Kova

- Desco WIPES non-woven mendillerle doldurmak ve uygun yüzey dezenfektanları emdirmek için eniden kullanılabilir dispenser sistemi

Ürün Özellikleri

DESCO WIPES, tıbbi cihazların ve her türlü tıbbi ekipmanın dezenfeksiyonu ve temizliği için yeniden kullanılabilir non-woven mendil dispenser sistemidir. DESCO WIPES, yeniden kullanılabilir, non-woven mendil dispenser sisteminden ve yeniden doldurma için non-woven mendil rulolarından oluşur. Hem kullanıma hazır dezenfektanlar hem de konsantre dezenfektanlar ile birlikte kullanılabilir, bu özelliği ile birlikte dispenser sistemi çok kullanışlı bir hal alır.

DESOTEX® yeniden kullanıma hazırlama mendilleri, non-woven mendil dağıtıcısını tekrar doldurmadan önce hijyenik hazırlığı sağlamak için her bir refil paketiyle birlikte kullanıcıya sağlanır.

Kullanım Alanları

DESCO WIPES, tıbbi cihazların, tıbbi ekipmanların ve her türlü yüzeylerin dezenfeksiyonu ve temizliği için uygun yüzey dezenfektanlarının emdirilmesi, hijyenik hazırlanması ve uygulanması için yeniden doldurulabilir non-woven mendil dispenser sistemidir.

Kullanım Şekli

Üreticinin talimatlarına göre hazırlanmış, kullanıma hazır dezenfektanlar veya konsantre dezenfektanlarla kullanım içindir. Yüzeyleri tamamen ıslanana kadar dezenfek-

tan emdirilmiş DESCO WIPES ile silin ve tüm temas süresi boyunca kurumaya bırakın.

Kullanım Talimatı

Doldurma: Dispenserin kapağını çıkarın ve dış tarafı çalışma tezgahına gelecek şekilde koyun. Kuru mendil rulusunu ambalajından çıkarın ve dispensera yerleştirin (alternatif olarak, önceden sıvı emdirilmiş mendilleri poşet ile yerleştirin). Dezenfektan solüsyonunu, dağıtıcıdaki mendil rulusunun üzerine dairesel hareketler ile yavaşça dökün. İlk mendili rulunun ortasından çekin ve mendilin ön kısmını yıldız şeklindeki dispenser sisteminden geçirin. Dispenserin mendil haznesini sıkıca kapatın. Dağıtım deliğini kapatırken, çekilen mendilin tamamen koruyucu kapakla kaplandığından emin olun. Etiket ek bilgilerle doldurun ve kapağa yapıştırın. 30 dakika sonra ıslak mendiller kullanıma hazırdır. İlk mendili kullanmadan atın.

DESCO WIPES dispenser sistemi her doldurulduğunda, sistem önleyici bir temizlik ve dezenfeksiyon işleminden geçirilmelidir. Olası kimyasal-termal ve termal prosedürlerin yanı sıra DESOTEX® yeniden kullanıma hazırlama mendilleri kullanılarak manuel hazırlık da mümkündür. DESOTEX® hazırlama mendilleri her refil mendil paketi ile birlikte verilir. Yeniden işlemeye önce dispenser sisteminin incelenmesi tavsiye



edilir. Aşınma izleri olması durumunda kapak/dispenser değiştirilmelidir.

Temizleme: Yeni veya boşaltılan dispenserin içini ve kenarlarını temizleme beziyle iyice temizleyin. Kapağın içini, kapağın kenarlarını, iç yüzeyleri ve dağıtıcı açıklığının kenarlarını iyice temizleyin. Kapağın dışını ve dispenserin dış yüzeylerini iyice temizleyin.

Dezenfeksiyon: Yeni veya boşaltılan dispenserin içini ve kenarını dezenfeksiyon mendili ile iyice silin. Kapağın içini, kapağın kenarlarını, iç yüzeyleri ve dağıtıcı açıklığının kenarlarını iyice temizleyin. Kapağın dışını ve dispenserin dış yüzeylerini iyice temizleyin.

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma


Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr




DESCO WIPES

Dispenser Kova


Hazırlama

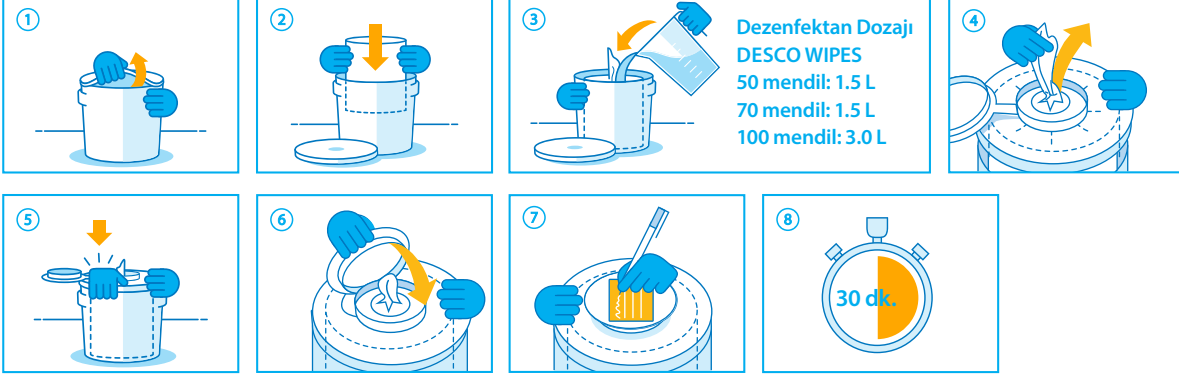

1 Temizleme

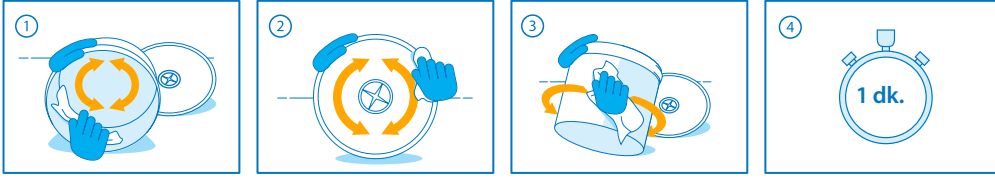

2 Dezenfeksiyon

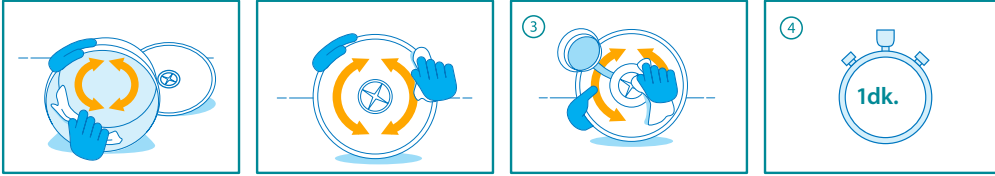

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	Boyut	REF
DESCO WIPES	Dispenser kovası	Boş	1	Büyük	00-915-SD001
	Dispenser kovası	Boş	6	Büyük	00-915-SD002
	Dispenser kovası	Boş	1	Küçük	00-915-SKD001
	Dispenser kovası	Boş	6	Küçük	00-915-SKD002
	Mendil rulosu	100 mendil	3	30 x 32 cm	00-915-RD10003-01
	Mendil rulosu	100 mendil	6	30 x 32 cm	00-915-RD10006-01
	Mendil rulosu	70 mendil	6	25 x 25 cm	00-915-RD7003-01
	Mendil rulosu	50 mendil	3	30 x 32 cm	00-915-RD5003-01



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

