

## Hızlı Dezenfeksiyon

## DESCOCEPT AF

Kullanıma hazır, alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı

- Kullanıma hazır
- Üstün temizleme sonuçları sağlar
- Ferah bir koku bırakır



## Ürün Tanımı

DESCOCEPT AF, etanol bazlı, aldehit içermeyen, kullanıma hazır, hızlı etkili bir dezenfektandır. DESCOCEPT AF, hoş ve taze bir kokuya sahiptir. Ürün, zarflı virüslere karşı kapsamlı etki göstermektedir ve son derece iyi temizleme gücüne sahiptir. DESCOCEPT AF, hızlı etki gerektiren alanlardaki yüzey dezenfeksiyon işlemleri için uygundur.

## Kullanım Alanları

## Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre:

Descosept AF, kullanıma hazır alkol içerikli non-invaziv tıbbi cihaz yüzeyi dezenfektanıdır. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda alkole dayanıklı non-invaziv tıbbi cihaz yüzeylerinin (hasta yatakları, muayene masaları, ameliyat masaları, sedyeleri, ameliyat lamba sistemleri, uv lambalar, cerrahi önlük ve eldivenler vb.) dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda diş hekimliği ünitelerinde, göz doktoru muayenehanelerinde ve optikçilerde kısa süreli ve etkili dezenfeksiyon için kullanılır. Özellikle ulaşılması zor yüzeyler için uygundur.

## Kullanımı

Yüzey ve objelere en az 30 cm uzaklıktan tamamen ıslanmaya kadar Descosept AF'yi püskürtün, etki süresinin geçmesinden sonra yüzeyde kalan dezenfektanı temiz

Antimikrobiyel Özellikleri ve Temas Süreleri			30 sn	1 dk	2 dk	5 dk
<b>Bakteri ve Yeast</b>						
Yüzey dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastsidal*	VAH / EN 16615	Mekanik etki ile, kirliliği			•	
	VAH / EN 13697	Mekanik etki ile, temiz ve kirliliği				•
Tüberkülozidal (M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul		•		
Mikobakterisidal (M. avium ve M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul			•	
<b>Virüsler</b>						
Zarflı virüsler	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil	•			
	EN 14476	Temiz ve kirliliği	•			
Norovirus (MNV)	EN 14476	Temiz koşul				•
Rotavirus	RKI/DVV			•		
<b>Ek Test Sonuçları</b>						
Bakterisidal	EN 1040		•			
	EN 1276	Temiz koşul		•		
	EN 13727	Temiz koşul	•			
		Kirli koşul		•		
EN 13697	Temiz koşul		•			
Yeastsidal (Candida albicans)	EN 1275		•			
	EN 1650	Temiz koşul		•		
	EN 13624	Temiz koşul		•		
	EN 13697	Kirli koşul		•		
Temiz koşul			•			

\* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif taşıyıcı testleri)



# DESCOCEPT AF

### Kullanıma hazır, alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı

bir bez ile siliniz. Havanın alkol ile yüklenmesini önlemek için **Descosept AF**'yi tek kullanımlık mendile püskürtün ve yüzeyleri ıslanmasını sağlayarak silin. **Descosept AF** pratikte yüzeylerde herhangi bir film tabakası bırakmaz.

#### Kullanım notları

**DESCOCEPT AF**, silme yöntemi ile veya köpük püskürtme yöntemi ile uygulanabilir. **DESCOCEPT AF**, dezenfeksiyon gücü değerlendirilmiş ve kullanım süresi 42 güne kadar olan dokumasız mendil dispensers sistemleri ile kullanılacaksa, **ONE SYSTEM** dokumasız mendil dispenser sistemleri ile kombine kullanıma veya kullanım süresi 28 güne kadar sistemlerde, **DESCO/ECO WIPES** dokumasız mendil dispenser sistemleri ile kombine kullanıma özellikle uygundur.

#### Bileşimi

100 g çözelti şunları içerir:  
42 g etanol, 0,05 g didesil dimetil amonyum klorür.  
Koku maddeleri içerir.

#### Bilirkişi raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

#### Dikkat

Alevlenir sıvı ve buhar.

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Kabı sıkıca kapalı tutun. Buharını solumayın. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. İçeriği/kabı lisanslı bertaraf tesisinde bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

#### Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.  
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

#### Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi  
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
DESCOCEPT AF	Şişe	1 L	12	00-TR311-00
	Bidon	5 L	3	00-TR311-050



CE 0482



Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanımından önce etiket ve ürün bilgi formu ve güvenlik bilgi formunu okuyunuz..



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

