

Dezenfeksiyon Mendilleri

DESCOCEPT AF WIPES

Hızlı Dezenfeksiyon için Alkol Bazlı Mendiller

- Pratik dispenserde evrensel, konforlu ve kolay kullanım
- Derinlemesine ve hızlı etki
- Özellikle rutin alanlardaki küçük ebatlı yüzeylerin dezenfeksiyonu için uygundur



Ürün Özellikleri

DESCOCEPT AF WIPES alkole dirençli tıbbi cihazların ve tıbbi envanterin ve her türlü yüzeyin dezenfeksiyonu ve temizlenmesi için alkolü, kullanıma hazır mendillerdir.

DESCOCEPT AF WIPES, küçük yüzeylerde zaman kazandıran bir dezenfeksiyon ve temizleme uygulaması sunar. Mendiller pratik ve tekrar kapatılabilir dispenserden tek tek çıkarılabilir.

Kullanım Alanları

AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre: Alkole karşı dayanıklı noninvaziv tıbbi cihazların hızlı dezenfeksiyonunda ve temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Kutunun içindeki mendil poşetini açın. Bir tane mendili rulodan çekin. Mendil Poşetini kutunun içine yerleştirin. Kutu kapağının ortasından rulodan çıktığınız mendili geçirin, dışarı çekin ve kapağı kutunun üzerine yerleştirin. Boşalan kutuları yeniden orijinal etiketli Descosept AF Wipes mendil paketleri ile doldurunuz. Descosept AF Wipes ile yüzey ve objeler tamamen ıslanmaya kadar silin. Etki süresi geçtikten sonra gerekli ise yüzeyde kalan dezenfektanı silin. Descosept AF Wipes uygulandığı yüzeyde kalıntı bırakmaz.

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			30 sn.	1 dak.	2 dak.	5 dak.	30 dak.
Bakteri ve yeast							
Yüzey dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastsidal.*	VAH / EN 16615	Mekanik etki ve kirlilik koşül			•		
tTüberkülozidal (M. terrae)	EN 14348	Temiz koşül		•			
Mikobakterisidal (M. avium and M. terrae)	EN 14348	Kirli ve temiz koşül			•		
Virus							
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil	•				
	EN 14476	Kirli ve temiz koşül	•				
Norovirus (MNV)	EN 14476	Temiz koşül				•	
Rotavirus	RKI/DVV			•			
Ek test sonuçları							
Bakterisidal	EN 1040		•				
	EN 1276	Temiz koşül		•			
	EN 13727	Temiz koşül	•				
		Kirli koşül		•			
EN 13697	Temiz koşül		•				
Yeastisid (Candida albicans)	EN 1275		•				
	EN 1650	Temiz koşül		•			
	EN 13624	Temiz koşül		•			
		Kirli koşül		•			
EN 13697	Temiz koşül		•				
Fungisidal (Aspergillus brasiliensis)	DGHM	Temiz koşül					•

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)



DESCOCEPT AF WIPES

Hızlı Dezenfeksiyon İçin Alkol Bazlı Mendiller

Kullanım Notları

Açıldıktan sonra raf ömrü: 3 aydır.

İçerik

Mendile emdirilmiş 100 g Descosept AF çözeltisi;
42g Etil alkol, 0,05 g Didesildimetilamonyum klorür ve parfüm içerir.

Materyal Uyumluluk

DESCOCEPT AF, aşağıdaki üreticilerin ürünlerinin kullanımı için onaylanmıştır.
- Konrad Hornschuch AG, Weißbach Skai® kaplama malzemesinde
- Bergé & Co. GmbH, Versmold MM-Desinfektionsmatten.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Uyarı

Alevlenir katı.

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Kabi sıkıca kapalı tutun. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.
- Descosept AF solüsyonu DGHM/VAH'ın dezenfektan listesinde kayıtlıdır.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	Boyut	REF	PZN
DESCOCEPT AF WIPES	Dispenser kutu	120 mendil	12	14 x 20 cm	00-312-D120	1898486
	Refil paket	120 mendil	12	14 x 20 cm	00-312-R120	1898581

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dezenfektanları güvenle kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyun.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

