

## Dental

## DESCOSUC

## Dental Vakum Sistemleri için Dezenfektan

- Mükemmel temizleme özelliği
- Düşük köpük formülasyonu
- Vakumlu dental sistemler için optimum materyal koruması
- Aldehitsiz, fenolsüz, kloruz
- DGHM/VAH'da listelenmiştir



## Ürün Özellikleri

DESCOSUC, dental aspiratör sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için deodorize et-kili kombine preparattır. Aktif klor içermez ve bu sebepten amalgam kaynaklı civa gibi ağır metal yeniden harekete geçmez. Bu yüzden amalgam seperatörlü dental aspiratörlerin koruyucu dezenfeksiyonu ve bakımı için son derece uygundur.

DESCOSUC, materyal koruyucu kuarterner amonyum bileşiklerinden oluşan, tamamıyla yeni bir etkin madde kombinasyonuna dayanır. Ürün, mükemmel temizleyici özellikler ve köpük önleyici içerir.

DESCOSUC, medikal uygulamalarda hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir (TRGS 525/540).

## Kullanım Alanları

Her tipteki dental aspiratörün dezenfeksiyonu ve temizliğinde kullanılır. DESCOSUC'un düzenli kullanımı yüksek hijyenik standartları ve aynı zamanda hatasız operasyonları garanti eder.

## Kullanım Şekli

1 litre çalışma solüsyonu hazırlamak için minimum 40-60°C'deki 980 ml sıcak suya 20 ml konsantreden ekleyiniz ve aspiratör ile çekiniz. Çalışma solüsyonu köpük içermez.

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			5 dk	15 dk	30 dk
<b>Bakteri ve yeast</b>					
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal,yeastisidal:*	VAH	Kirli koşul		%2	%1
<b>Virüs</b>					
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil		%2	
	EN 14476	Temiz koşul	%1		
<b>Ek EN test sonuçları</b>					
Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul		%2	%1
	EN 14561	Kirli koşul	%1		
Yeastisidal (C. albicans)	EN 13624	Kirli koşul	%0,50		
	EN 14562	Kirli koşul	%1		

\* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

Gerektiğinde aspiratör ile emme işlemini günde üç defa uygulayınız.

## Uygulama Notları

Aspiratör sisteminin optimal koruması için, çalışmaya başlamadan önce dezenfeksiyon işleminin yapılması ve dezenfeksiyon maddesinin geceden tertibatın içinde bırakılması önemle tavsiye edilir.

Dozajlama yardımcısı olarak bidon için dozaj pompası ve musluk kullanılabilir

## İçerik

100 g solüsyon;  
6,0 g dialkildimetilamonyum klorür içerir.



## DESCOSUC

## Dental Vakum Sistemleri için Dezenfektan

Üründeki tüm yüzey aktif maddeler (tensid-ler) EU deterjan yönetmeliğine göre biyolojik olarak parçalanabilir.

**Bilirkişi Raporları**

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

**Tehlike**

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın Çevreye verilmesinden kaçının.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

**Ruhsat**

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

**Üretici Firma**

Dr.Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya  
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444  
www.schumacher-online.com

**İthalatçı Firma**

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi  
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87  
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
DESCOSUC	Şişe	2 L	6	00-814-020
	Şişe	5 L	3	00-814-050



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

