



## DESCOTON % 2 GDA

### Alet ve Endoskoplar İçin % 2 Gluterdialdehit İçerikli Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

- Gluteraldehit içerir.
- Hızlı etki gösterir.
- Kullanıma hazırdır.
- Materyallere karşı hassastır.
- Endoskopların yeniden işleme hazırlanması için uygundur.



### Ürün Özellikleri

Descoton %2 GDA kullanıma hazır, formaldehit içermeyen bir preparattır. Yüksek malzeme uyumluluğu ve korozyon inhibitörleri nedeniyle özellikle hassas malzemeler için uygundur.

### Kullanım Alanları

Descoton %2 GDA flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonunun yanı sıra her türdeki cerrahi aletin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının ve laparoskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için kullanılır. Hızlı etki göstermesi sebebiyle

Mikrobakteriyel etkinlik	EN Standard	Test Koşulları	Etkinlik Süresi
Alet Dezenfeksiyonu ( bakterisidal, yeastisidal)	EN 13727, EN 13624 , EN 14348	Kirli Koşullar	5 dk.
Mycobactericidal ( M.avium, M.terrae)	EN 14348	Kirli Koşullar	15 dk.
Tuberculocidal	EN 14348	Temiz Koşullar	5 dk.
Zarflı Virüsler ( HBV/HIV/HCV /BVDV)	RKI/DVV	x	30 sn.
Bakterisidal	EN 13727	Kirli Koşullar	1 dk.
	EN 14561	Kirli Koşullar	5 dk.
Yeastisidal	EN 13624	Kirli Koşullar	1 dk.
	EN 14562	Kirli Koşullar	1 dk.
Fungusidal	EN 13624	Kirli Koşullar	5 dk.
Sporicidal	AFNOR NF T 72-231	x	45 dk.

aynı zamanda TEE (Trans özofageal ekokardiyografi) problemleri ve her çeşit cerrahi aletin dezenfeksiyonunda kullanımı uygundur.

### Kullanım Şekli

Ön temizliği yapılmış aletleri kullanıma hazır Descoton %2 GDA solüsyonu içine daldırın. Bütün yüzey, boşluk ve çukurlar çözelti ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Temas süresi geçtikten sonra aletleri deiyonize su ile dikkatlice durulayınız ve kurutunuz. Çalışma solüsyonunda gözle görülür bir kirlilik olduğu takdirde derhal yenileyiniz ve her gün yeni solüsyon hazırlayınız. Validasyonu yapılmış prosedürlere uygun olarak aletleri sterilize ediniz.

5L bidonlar için dozaj pompası dozajlama yardımcısı olarak kullanılabilir.

### Bileşimi

100 g çözelti 2 g Gluterdialdehit içerir

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm : berrak, renksiz sıvı

pH değeri : 4,5 – 5,5

Yoğunluğu : ~ 1,02

### Ambalaj Şekilleri

Çıklama

5 L Bidon

Ambalaj Şekli

3x5 Litre

### Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.



## Uyarılar

DESCOTON% 2 GDA kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Descoton %2 GDA ilk defa kullanılıyorsa aletlerin özellikle endoskopların ve dezenfeksiyon küvetinin non-iyonik bir temizleyici ile temizlenmesi önerilir. Mentşeleri korumak için SPEZIAL ÖLSPRAY kullanınız.

Dikkat: Çok kirli aletlerde Instru Plus Flüssig veya Desco Cleaner gibi non iyonik esaslı ek temizleyiciler kullanılması tavsiye edilir.

Desco Cleaner, Descoton %2 GDA kullanılmadan önce kullanılır.

Instru Plus Flüssig, Descoton %2 GDA ile kombine olarak da kullanılabilir.

## Tehlike

Gluteraldehit, Etan-1,2-diol  
Yutulması halinde zararlıdır. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Tozunu/dumanını /gazını / sisini/buharını /spreyini solumaktan kaçının.Sucul Ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'nin ( UZEM) 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. DERİYLE TEMASI HALİNDE : Bol su ve sabun ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar göre kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nees alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**\*Sadece profesyonel kullanım.**

## Ruhsat

Ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

## Üretici

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.A.Ş  
Tire Organize Sanayi Bölgesi İbni Melek OSB Mah.  
Yol 5 Sokak. No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87

[www.desomedeuro.com](http://www.desomedeuro.com)

[info@desomedeuro.com](mailto:info@desomedeuro.com)

02/2018