

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

ENDEX®

Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

- Yüksek materyal uyumluluğu
- Cerrahi aletler için ideal
- Mükemmel temizleme özelliği



Ürün Özellikleri

ENDEX, tıbbi aletlerin tek işlemden temizliğini ve dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kullanıma hazır bir preparattır.

ENDEX, tamamen yeni sinerjistik aktif madde temeline dayanır. Aldehit ve Fenol içermez. İçerdiği etkili korozyon inhibitörleri sayesinde dezenfeksiyon işlemi esnasında malzemelere zarar vermez.

ENDEX kullanımı sırasında rahatsız edici koku oluşturmaz, hoş kokuludur.

Kullanım Alanları

ENDEX her türlü cerrahi aletin kısa sürede dezenfeksiyonunu sağlar. Ayrıca ısıya karşı hassas veya dayanıklı aletler MIC cerrahisinde aletler ve anestezi malzemeleri için de çok uygundur. Ultrasonik banyolarda kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Aletleri kullanımından hemen sonra solüsyon içine açık olarak koyunuz. Dezenfekte edilecek yüzey ve boşluklar çalışma solüsyonu ile tamamen ıslanmış olmalıdır, aletler üzerinde hava kabarcığı oluşmamasına dikkat ediniz. Etki süresi geçtikten sonra aletleri akan suyun altında dikkatlice

Etki Spektrumu ve Temas Süresi		15 dk
Bakteri ve yeast		
Bakterisidal	VAH / EN	•
Fungusid		•
Virüs id		•
Papova/polyomavirus	RKI/DVV	•
Tüberkülozidal (M. terrae)		•

yıkayınız ve kurulayınız. Tüm sirkülasyon prosedürleri için uygundur.

Çalışma solüsyonu optimum şartlarda 14 gün boyunca kullanılabilir. Ancak mümkünse günlük olarak yenilenmesi tavsiye edilir, eğer görünür bir kirlenme varsa solüsyonu gün sonunu beklemeden değiştirin.

Uygulama Notları

İlk kullanımından önce kimyasal kalıntıları aldehitleri uzaklaştırmak için aletlerin ve dezenfeksiyon küvetinin su ile ön temizliğini yapınız.

KULLANIMA HAZIRDIR, SEYRELTMEYİNİZ!

İçerik

ENDEX, PERFEKTAN ENDO'dan %3 oranında Dr. Schumacher Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından seyreltilerek ambalajlanmıştır.

100 g ENDEX;
0,11 g Kokospropilendiaminguanidinyumasetat
0,17 g Didesilmetiloksietilammonyumpropionat içerir.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

ENDEX®

Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

Tehlike

N,N-Didesil-N-metil-poli(oksietil)amonyumpropionat, Alkol etoksilat C9-C11, Kokospropilendiaminguanidinyumasetat içerir.

Cildi tahriş edebilir. Bu sebeple çözeltinin göz ve cilt temasını önleyiniz. Temas etmesi halinde bol suyla yıkayınız. Çalışırken eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız. Yutmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. Çevreye verilmesinden kaçınınız.

LD50/oral/sıçan: 500-2000 mg/kg

Sadece profesyonel kullanım içindir.


Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.
- **PERFEKTAN ENDO** DGHM/VAH güncel dezenfektan listesinde kayıtlıdır.

Üretici Firma

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5.Yol No:42 Tire/ İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
ENDEX	Bidon	5 L	3	END-00500

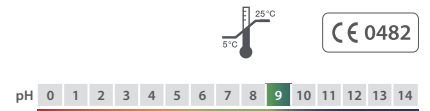

Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

