



HIZLI BAŞLAMA
15 DK
FONKSİYONU

KULLANIM
SÜRESİ
6 HAFTA
TEST EDİLDİ

Dokumasız mendil dispenser sistemi

one system basic

Dezenfektan ile emdirilmek üzere geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi

- Ekstra kullanım kolaylığı ve dolun durumunun rahatça kontrol edilebilmesini sağlayan, artırılmış sağlamlık sunan kullanışlı esnek yapılı ambalaj
- Dezenfektanla emdirmek üzere, DESOTEX dokumasız kumaştan üretilmiş mendiller ile doldurulmuştur
- Ciddi enfeksiyon riski olan alanlar da dahil – 15 dakikada kullanıma hazır – kullanım süresi: 42 gün



Ürün tanımı

ONE SYSTEM BASIC, hijyen kurallarının uygulanması için geliştirilmiş, yenilikçi, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemidir. Uygun dezenfektanlarla birlikte kullanarak, tıbbi ürünlerin ve tıbbi aletlerin ve her türlü yüzeyin hijyenik güvenli bir biçimde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlar.

ONE SYSTEM BASIC, pratik ve zaman tasarrufu bir çözüm sunar. Sistemin hâlihazırda içinde bir adet DESOTEX dokumasız malzeme teknolojisiyle üretilmiş mendil rulusunun bulunması sayesinde kullanıcı, dezenfektanı doldurup 15 dakikalık ön emdirme süresini bekledikten hemen sonra istenen dezenfeksiyon prosedürünü uygulayabilir. Dr. Schumacher ürünleri ile birlikte kullanıldığında ONE SYSTEM BASIC'in kullanım süresi, piyasadaki diğer ürünlerde olduğu gibi 28 gün değil, 42 gündür. Rulo tükendiğinde sistem yeniden kullanıma hazırlanmaz; boşaltılmış olarak, doğrudan tasfiye edilebilir. ONE SYSTEM BASIC'in tek kullanımlık ürün olarak tasarlanmış olması sayesinde, yeniden işleme hazırlama veya tekrar kullanım sonucu meydana gelebilecek olası kontaminasyon risklerini ortadan kaldırır. Bu yüzden sistem, sağlık sektöründeki standart kullanım alanlarının yanı sıra, ciddi enfeksiyon riski olan alanlarda da bilhassa kullanıma uygundur.

Dezenfektan	Kullanım süresi 42 gündür	4 alan metni ¹	Ciddi enfeksiyon riski olan alanlarda da kullanılabilir
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
OPTISAL N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOCEPT AF	✓	✓	✓
DESCOCEPT FORTE	✓	✓	✓
DESCOCEPT SENSITIVE	✓	✓	✓

¹ EN 16615 normunda öngörülen bütün zorunlu test mikroplarına karşı test edilmiştir (bakterisid, levurosid)

Yenilikçi tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi, kolay, güvenilir ve etkin kullanım sunar. Sistemin yapı ve kullanım özellikleri, sıradan diğer dokumasız mendil dispenser sistemlerini baz alır ama aynı zamanda artı avantajlar da sunar: Dokumasız malzeme teknolojisiyle üretilmiş mendil rulusuna göre hizalandırılmış olan dispenser ağzı sayesinde rulunun tamamının istenen şekilde emdirilebilmesinin ve böylece hazırlama süresinin

kısaltılmasının yanı sıra mendile ilk kullanımda hızlıca erişebilmektedir. Dolun işlemi, kullanıcı tarafından pratik ve sezgisel olarak yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece kullanıcının ihtiyaç duyduğu süreç adımları belirgin şekilde azalır. Torbanın şeffaf tasarımı, bir bakışta dolun durumunun kontrol edilebilmesini ve tedarik ihtiyacının planlanabilir olmasını temin eder.




Dokumasız mendil dispenser sistemi

one system basic

Dezenfektan ile emdirilmek üzere geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi

Kullanımla ilgili not

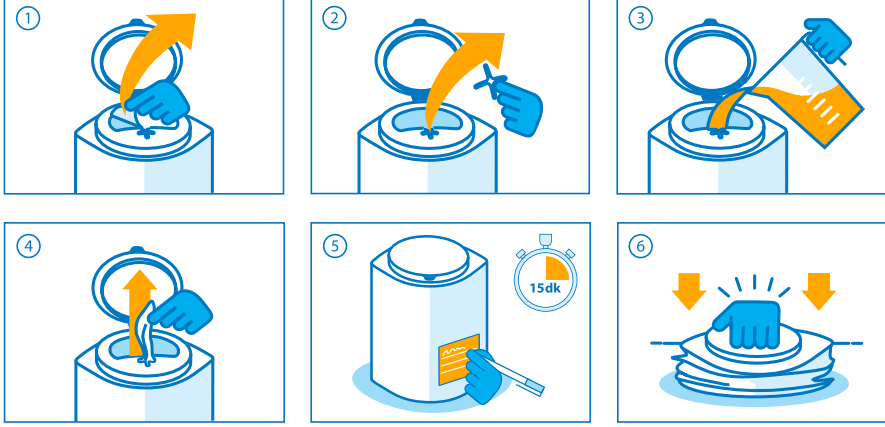

Çok az yer kapsayacak ve bertaraf edilebilecek şekilde tasarlanmış olan dispenser, mendil alma tertibatından ve özel olarak tasarlanmış dik durabilen bir torbadan oluşur.

DESOTEX birinci kalite dokumasız kumaş, yırtılmaya dayanıklı, tüylenme eğilimi düşük dokumasız kumaştan oluşur ve tavsiye edilen dezenfektanlar ile kullanımı geniş kapsamlı olarak test edilmiştir.

Kullanıcı dostu, ekonomik ve kanıtlanmış şekilde etkili sonuçlar sağlayan ONE SYSTEM BASIC, uygulanması öngörülen dezenfeksiyon prosedürünün en iyi şekilde yapılmasını temin eder.

Kullanım alanları

Her türlü tıbbi ürünün, tıbbi aletin veya yüzeyin temizlik ve dezenfeksiyonu için, uygun yüzey dezenfektanları ile emdirmek, hijyenik biçimde saklamak ve birlikte kullanmak üzere geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi.

Kullanımı

ONE SYSTEM BASIC, uygun non-woven mendiller ile doldurulmuş olarak sunulur ve istenen dezenfektan ile kullanıcı tarafından doldurulur: İstenen dezenfektanın 2,5 l kullanıma hazır çözeltisini hazırlayınız (Konsantrasyon oranı ve etki süresi için, üretici talimatlarını referans alınız).

Dokumasız mendil dispenserinin koruyucu kapağını açınız. Su geçirmez zarın iki parçasını da çıkarınız. 2,5 litre dezenfektan çözeltisi doldurunuz. İlk mendili, dispenser bileşeninde yer alan çapa şeklindeki delikten geçirin. İlk mendili dışarı çekip atınız. Koruyucu kapağı kapatınız ve -tercihe bağlı olarak- taşıma sapını takınız. Etiket üzerindeki dokümantasyon alanlarını eksiksiz olarak doldurunuz.

Sistem, 15 dakikalık ön emdirme süresinin ardından kullanıma hazırdır.

Not: 42 güne çıkarılmış kullanım süresi yalnızca Dr. Schumacher GmbH tarafından üretilen, VAH listesinde yer alan, seçili yüzey dezenfektanları için geçerlidir. Bir ürüne ait onaylanmış kullanım süresi ve uygunluk bilgisi ile ilgili sorularınız olması durumunda, lütfen bizimle veya ilgili dezenfektanın üreticisiyle irtibata geçiniz.

Bilirkişi raporu

Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde bilirkişilerce değerlendirilmektedir. Talep üzerine, bilirkişi dosyamızı size sunmaktan memnuniyet duyarız.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ürün	Ambalaj şekli	İçindekiler	Ambalaj birimi	Boy	Ürün no.
ONE SYSTEM BASIC	Dispenser	120 yaprak	4	17,5 x 36 cm	00-915-OSEB120-01
Aksesuarlar	Duvar aparatı	-	1	-	00-902-OSB

Dezenfektan kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kullanım öncesinde her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz.



Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

