



HIZLI BAŞLAMA
15 DK
FONKSİYONU

KULLANIM
SÜRESİ
6 HAFTA
TEST EDİLDİ

Dokumasız mendil dispenser sistemi

one system⁺ PLUS

Dezenfektan ile dolum yapmak için, tek kullanımlık, dokumasız mendil dispenser sistemi

- Ekstra kullanım kolaylığı sağlayan yenilikçi tasarım
- Dezenfektanla emdirmek üzere, DESOTEX dokumasız kumaştan üretilmiş mendiller ile doldurulmuştur
- Ciddi enfeksiyon riski olan alanlar da dahil – 15 dakikada kullanıma hazır – kullanım süresi: 42 gün



Ürün tanımı

ONE SYSTEM PLUS, hijyen kurallarının uygulanması için geliştirilmiş, yenilikçi ve kabul görmüş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemidir. Uygun dezenfektanlarla birlikte kullanarak, tıbbi ürünlerin ve tıbbi aletlerin ve her türlü yüzeyin hijyenik güvenli bir biçimde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlar.

ONE SYSTEM PLUS, pratik ve zaman tasarruflu bir çözüm sunar. Sistemin hâlihazırda içinde bir adet DESOTEX dokumasız malzeme teknolojisiyle üretilmiş mendil rulusunun bulunması sayesinde kullanıcı, dezenfektanı doldurup 15 dakikalık ön emdirme süresini bekledikten hemen sonra istenen dezenfeksiyon prosedürünü uygulayabilir. Dr. Schumacher ürünleri ile birlikte kullanıldığında ONE SYSTEM PLUS'un kullanım süresi, piyasadaki diğer ürünlerde olduğu gibi 28 gün değil, 42 gündür. Rulo tükendiğinde sistem yeniden kullanıma hazırlanmaz; boşaltılmış olarak, doğrudan tasfiye edilebilir. ONE SYSTEM PLUS'un tek kullanımlık ürün olarak tasarlanmış olması sayesinde, yeniden işleme hazırlama veya tekrar kullanım sonucu meydana gelebilecek olası kontaminasyon risklerini ortadan kaldırır. Bu yüzden sistem, sağlık sektöründeki standart kullanım alanlarının yanı sıra, ciddi enfeksiyon riski olan alanlarda da bilhassa kullanıma uygundur.

Dezenfektan	Kullanım süresi 42 gündür	4 alan metni ¹	Ciddi enfeksiyon riski olan alanlarda da kullanılabilir
OPTISAL® PLUS	✓	✓	✓
BIGUANID FLÄCHE N	✓	✓	✓
OPTISAL N	✓	✓	✓
CLEANISEPT®	✓	✓	✓
DESCOCEPT AF	✓	✓	✓
DESCOCEPT FORTE	✓	✓	✓
DESCOCEPT PUR	✓	✓	✓

¹ EN 16615 normunda öngörülen bütün zorunlu test mikroplarına karşı test edilmiştir (bakterisid, levurosid)




Dokumasız mendil dispenser sistemi

one system⁺ PLUS

Dezenfektan ile dolum yapmak için, tek kullanımlık, dokumasız mendil dispenser sistemi

Kullanımla ilgili not

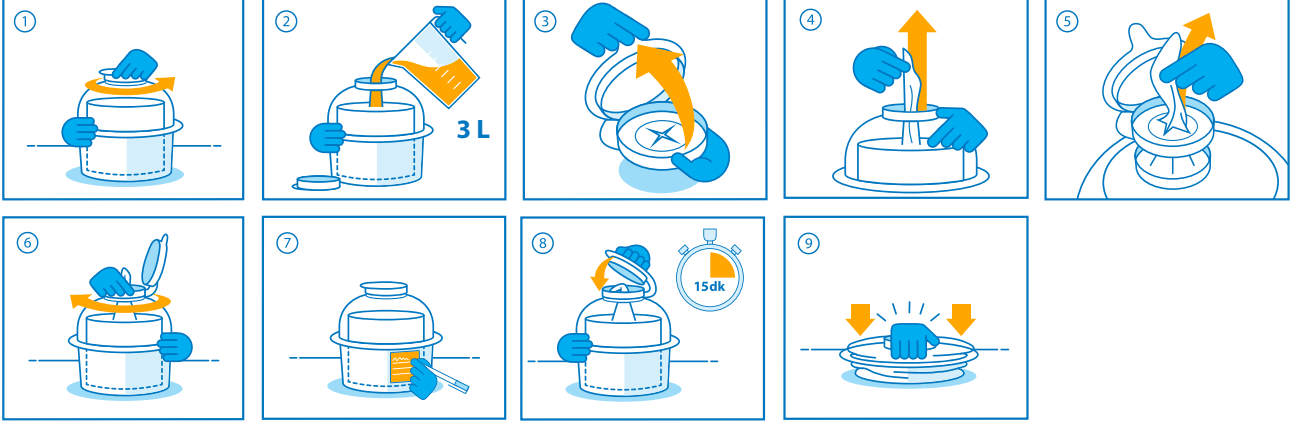

Yenilikçi tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi, kolay, güvenilir ve etkin kullanım sunar. Sistemin yapı ve kullanım özellikleri, sıradan diğer dokumasız mendil dispenser sistemlerinin sağladıklarını sunmakla kalmaz, aynı zamanda fazlasını sunar: Dokumasız malzeme teknolojisiyle üretilmiş mendil rulonuna göre hizalandırılmış olan dispenser ağı sayesinde rulonun tamamının istenen şekilde emdirilebilmesinin ve böylece hazırlama süresinin kısaltılmasının yanı sıra mendile ilk kullanımda hızlıca erişebilmektedir. Dolum işlemi, kullanıcı tarafından pratik ve sezgisel olarak yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı, bu süreç kapsamında çok daha az çalışma adımına ihtiyaç duyar. Sistemin şeffaf tasarımı, bir bakışta dolum durumunun kontrol edilebilmesini ve tedarik ihtiyacının planlanabilir olmasını temin eder. Katlanabilir, hafif yapıdaki dispenser homojen polipropilen malzemeden üretilmiş olduğundan, özel düzenlemelere tabi değildir ve fazla yer almadan bertaraf edilebilir.

DESOTEX birinci kalite dokumasız kumaş, yırtılmaya dayanıklı, tüylenme eğilimi düşük dokumasız kumaştan oluşur ve tavsiye edilen dezenfektanlar ile kullanımı geniş kapsamlı olarak test edilmiştir.

Kullanıcı dostu, son derece ekonomik ve kanıtlanmış şekilde etkili sonuçlar sağlayan **ONE SYSTEM PLUS**, uygulanması öngörülen dezenfeksiyon prosedürünün en iyi şekilde yapılmasını temin eder.

Kullanım alanları

Her türlü tıbbi ürünün, tıbbi aletin veya yüzeyin temizlik ve dezenfeksiyonu için, uygun yüzey dezenfektanları ile emdirmek, hijyenik biçimde saklamak ve birlikte kullanmak üzere geliştirilmiş, tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi.

Kullanımı

Kullanıma hazır veya üretici talimatları uyarınca hazırlanmış dezenfektanlar ile birlikte kullanılır. Doğru kullanımda kullanım süresinin 42 güne kadar çıktığı, şu ürünlerle birlikte kullanılmasını tavsiye etmekteyiz: OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT PUR, DESCOSEPT FORTE, CLEANISEPT.

Dokumasız kumaş mendil dispenser sisteminin dispenser kapağını çevirerek çıkartınız. Üst tarafı aşağıya gelecek şekilde temiz bir yüzeyi üzerine yerleştiriniz. Hâlihazırda içinde yer alan dokumasız mendil rulonunu 3,0 l kullanıma hazır dezenfeksiyon çözeltisi ile emdiriniz. Dispenser kapağının koruyucu kapağını açınız. İlk mendili, mendil rulonunun ortasından dışarı çekiniz. Mendilin ucunu, dispenser kapağında yer alan yıldız şeklindeki mendil alma deliğinden geçirin. Dispenser kapağını çevirerek tekrar üzerine yerleştiriniz ve koruyucu kapağı kapatınız. Mendil alma deliğini kapatırken, dışarı çekilen mendilin

koruyucu kapak tarafından tamamen sarılmış olmasına dikkat ediniz. Başlangıç bilgileri etiketini eksiksiz olarak doldurunuz. Mendiller 15 dakika sonra kullanıma hazır halde olur. İlk mendili kullanmadan atınız.

Yüzeyleri, komple kapanacak şekilde, emdirilmiş **ONE SYSTEM PLUS** mendilleri ile siliniz ve etki süresinin tamamı boyunca kurumaya bırakınız.

Tek kullanımlık sistem! Olası sıvı artıklarını tasfiye ediniz, açık dispenser kapaklı dispenser bastırarak buruşturunuz ve geri dönüşüm noktasına bırakınız.

Kullanımla ilgili not

İçindekiler

Bir **ONE SYSTEM PLUS** dispenserde 32 cm x 30 cm ebadında, yırtılmaya dayanıklı, tüylenme eğilimi düşük non-woven malzemeden (%100 PET sentetik lif karışımından) üretilmiş 100 adet mendil vardır.

Tasfiye

ONE SYSTEM PLUS tek kullanımlık dokumasız mendil dispenser sistemi, propilenden üretilmiş olup, tek kullanımlık bir üründür. **ONE SYSTEM PLUS**, kullanıldıktan sonra geri dönüşüm noktasına teslim edilebilir. Tasfiye etmeden önce olası sıvı kalıntıları boşaltılmalıdır.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com



Dokumasız mendil dispenser sistemi

one system⁺ PLUS

Dezenfektan ile dolum yapmak için, tek kullanımlık, dokumasız mendil dispenser sistemi

Bilirkişi raporu

Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde bilirkişilerce değerlendirilmektedir. Talep üzerine, bilirkişi dosyamızı size sunmaktan memnuniyet duyarız.



Ürün	Ambalaj şekli	İçindekiler	Ambalaj birimi	Boy	Ürün no.
ONE SYSTEM PLUS	Dokumasız mendil dispenser	100 yaprak	2	32 x 30 cm	00-915-OSEE100EXP

Ürün ve ambalaj şeklinin temin edilebilmesi için, söz konusu ülkede ürünün kaydı yapılmış olması gerekmektedir.

Dezenfektan kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kullanım öncesinde her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

