



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® PAA

konsantre baz bileşen ve aktivatör

Manuel alet dezenfeksiyonu için konsantre sıvı

- rijid ve fleksible endoskoplarda kullanım
- hızlı etkinlik
- geniş etkinlik spektrumu



Ürün Özellikleri

PERFEKTAN® PAA her türlü cerrahi aletin kullanımında ve manuel alet dezenfeksiyonu için oldukça etkili konsantre bir üründür. Perfektan® PAA kullanımı kolaydır, çünkü iki bileşenli çözeltisi anında etkinliğe izin verir ve toz bazlı ürünlerle çalışırken oluşan zaman kaybını önler.

PERFEKTAN® PAA temel bileşenlerle kombinasyon halinde olan sıvı perasetik asit etkinliği/ aktifleştiriciliği sayesinde oldukça yüksek etkiye sahiptir. Yüksek organik kirlilik olduğunda bile PERFEKTAN® PAA, kullanıcı tarafından maksimum etkinliğin ve hızlı etki süresinin talep edildiği her durumda alet dezenfeksiyonu için uygundur.

Kullanım Alanları

Endoskoplarda thermo-kimyasal dezenfeksiyondan önceki ön temizliği içindir. Rijit ve fleksible endoskoplarda yanı sıra her türlü tıbbi cihazın (cerrahi aletler, anestezi ekipmanı) manuel dezenfeksiyonu için uygundur.

Etki Spektrumu

- Bakterisidal (MRSA dahil)
- Tüberkülozidal
- Yeastisidal
- Fungisidal
- Virusidal
- Sporisidal

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			1 dak.	5 dak.	15 dak.	30 dak.	60 dak.
Alet dezenfeksiyonu (bakterisidal, yeastisidal)	VAH	Kirli koşul		%2			%1
Virüs							
Zarflı virüs ve zafsız virüs (virucidal)	EN 14476	HBV/HIV/HCV dahil Temiz koşul			%2		
Polio virüs					%2		
Adeno virüs				%1			
Noro virüs (MNV)				%1			
Sporisidal (Clostridium difficile)		Kirli koşul		%2		%1	

Kullanım Şekli

Daldırma banyosu ile dezenfeksiyon için: %1'lik bir çalışma çözeltisi hazırlamak için 2x 100 ml'lik şişelerin tüm içeriğinin 10 L su (%2 = 5 L) içinde seyreltilmesi gerekir. Konsantre baz bileşeni ve konsantre aktivatörü daima birlikte kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ: İki şişenin tüm içeriğini suya doldururken konsantre baz bileşeni ile konsantre aktivatörü arasında temas olmamasına dikkat edilmelidir. Her iki şişe de tamamen boşaltılmalıdır. Konsantrasyon ve temas süresi aşılmamalıdır.

Dozajlama

	%1	%2
5 litre	-	1x ürün seti
10 litre	1x ürün seti	2x ürün seti

Materyal Uyumluluk

Şu materyallerle kullanımı uygun değildir. Alüminyum Anotlanmış alüminyum Polikarbonat (PC) Akriilonitril-Bütadien-Stiren (ABS)



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama



PERFEKTAN® PAA

Manuel alet dezenfeksiyonu için konsantre sıvı

Ek EN test sonuçları			1 dak.	5 dak.	15 dak.	30 dak.	60 dak.
Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul	%0,5				
Yeastisidal	EN 13624	Kirli koşul	%1,0	%0,5			
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14348	Kirli koşul		%2,0		%1,0	
Mikobakterisidal (M. avium)	EN 14348	Kirli koşul		%2,0			%1,0
Bakterisidal	EN 14561	Kirli koşul	%1,0				
Yeastisidal	EN 14562	Kirli koşul	%1,0	%0,5			
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14563	Kirli koşul	%2,0	%1,0			
Mikobakterisidal (M. avium)	EN 14563	Kirli koşul	%2,0	%1,0			
Sporisidal (C. difficile)	EN 13704	Kirli koşul		%2,0		%1,0	

İçerik

Konsantre baz bileşen:

%5 perasetik asit
%25 hidrojen peroksit

Konsantre aktivatör:

non-iyonik yüzey aktif maddeler < %5
fosfonatlar < %5

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Konsantre baz bileşen:

Hidrojen peroksit; Asetik asit; Perasetik asit.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya

etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Konsantre aktivatör:

Sodyum hidroksit; Alkol etoksilat C9-C11.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

Çevresel Bilgi

Dr. Schumacher GmbH'nin ürünleri modern, güvenli ve çevre dostu süreçlere göre üretilmektedir. Tutarlı yüksek ürün kalitesi, en yüksek kalite standartlarına bağlılığımız ve uyumumuzla garanti edilmektedir.

Ruhsat

-93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.
- Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlıdır.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PERFEKTAN PAA	Şişe	2 x100 ml	4 x 2	00-157-001



CE 0482



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

