

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PLURAZYME® EXTRA

Cerrahi Aletlerin ve Endoskoplarnın Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Üçlü-Enzimatik Temizleyici

- Güçlü temizlik gücü
- Ekonomik kullanım için konsantre
- Mükemmel malzeme uyumluluğu



Ürün Özellikleri

PLURAZYME EXTRA mükemmel bir malzeme uyumluluğuna sahiptir ve bu nedenle cerrahi aletlerin ve esnek endoskoplarnın manuel olarak yeniden işlenmesi için ideal bir temizleme konsantresidir. Kullanımda ekonomiktir ve ultrasonik banyolarda kullanılması tavsiye edilir.

PLURAZYME EXTRA, yüksek seviye noniyonik yüzey aktif maddeler ve stabilize üçlü enzim kompleksinin kombinasyonu sayesinde mükemmel bir temizleme performansı sağlar. Kendi kendine aktive olan formül, ulaşılması zor bölgelerdeki proteinler, pıhtılaşmış kan, mukus, kusmuk, yağ ve dışkı maddesi gibi her türlü organik kirlenmeye nüfuz eder ve bütünsel olarak ortadan kaldırır.

Kullanım Alanları

PLURAZYME EXTRA özellikle protein sabitlemesi olmaksızın manuel temizlik için uygundur:

- her türlü tıbbi cihaz
- sert ve esnek endoskoplarn
- endoskopik aksesuarlar
- ultrasonik banyolarda kullanım için idealdir.

Kullanım Şekli

Daldırma banyosunda temizleme prosedürü: Aletleri, gerekli olabilecek herhangi bir ön temizlemeden sonra, çalışma solüsyonuna yerleştirin ve gerektiğinde mekanik olarak temizleyin. Maruz kalma süresi geçtikten sonra aletleri iyice suyla durulayın ve işlemeye devam edin. Ultrasonik banyolarda kullanım için uygundur. Görünür bir kirlilik varsa çalışma çözeltisini değiştirin, ancak en azından her iş günü bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kullanım Notları

1 litre ılık su başına 4 ml konsantre kullanarak %0,4 PLURAZYME EXTRA'nın çalışma solüsyonunu hazırlayın. Ilık su kullanılması (sıcaklık = 30 - 40°C) önerilir.

Dozajlama

Konsantrasyon	Sıcaklık	Daldırma Süresi
0.25 % (2.5 ml/L) Ultrasonik banyolar için tavsiye edilen	30 - 40 °C	minimum 5 min.
0.4 % (4 ml/L)	30 - 40 °C	minimum 5 min.

İçerik

%5-15 iyonik olmayan yüzey aktif maddeler; koruyucular:2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2

benzyl isothiazol-3(2H)-one; enzymler: Protease, amylase, lipase

Materyal Uyumluluk

PLURAZYME EXTRA mükemmel bir malzeme uyumu sağlar ve aşağıdaki malzemeler için uygun olduğu test edilmiştir.

Önerilen kullanımlar:

Metaller

- Paslanmaz çelik (V2A, V4A)
- Bakır
- Alüminyum

Plastikler

- Polimetilmetakrilat (PMMA)
- Polioksimetilen (POM)
- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS)
- Polikarbonat (PC)
- Poliüretan (PU)
- Polietilen (PE)
- Poliamid (PA6, PA12)
- Polistiren (PS)
- Polyester (PES)

Elastomerler

- Nitril Bütadien Kauçuk (NBR)
- Neopren, Polikloropren
- Silikon
- Lateks

Önerilmeyen kullanımlar:

- Pirinç Levha



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PLURAZYME® EXTRA

Cerrahi Aletlerin ve Endoskopların Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Üçlü-Enzimetik Temizleyici

- Etilen Propilen Dien Monomer Ruberi (EPDM)

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Ciddi göz hasarına yol açar. Amilaz, alfa, Subtilisin, Lipaz, triaçilgliserol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld-Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5.Yol No:42 Tire/ İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PLURAZYME EXTRA	Dispenser şişe	1 L	12	00-138-010EXP
	Şişe	2 L	6	00-138-020
	Bidon	5 L	3	00-138-050EXP
Uygulama yardımcıları	Dozaj pompası	500/1000 ml	1	00-906-005-02
	Dozaj pompası	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	Musluk	2L/5 L/10 L	1	00-907-000
Ek malzemeler	Bidon Kapak Açma Aparatı	-	1	00-909-050



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info@schumacher-online.com.tr www.schumacher-online.com.tr

