


# THERMOTON CLEAR

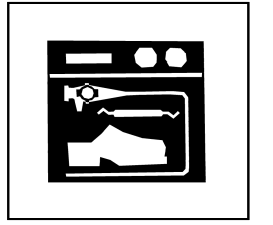

Tıbbi Alet Dezenfeksiyonu (Makine)

## Yıkama ve Dezenfeksiyon Makineleri İçin Durulama ve Parlatma Solüsyonu

*Biyolojik olarak  
indirgenebilir.*

### Preparat Tipi

**Thermoton Clear**, tıbbi yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için nötralize etkili, durulayıcı ve parlatıcı özellikte bir solüsyondur. Özel formülasyon, tüm materyallerde lekesiz kurumayı sağlar. Ayrıca korozyon inhibitörleri sayesinde mükemmel materyal uyumluluğu vardır. **Thermoton Clear**, alkali temizleyicilerden sonra nötralizasyon solüsyonu olarak kullanılır. Yıkama makinelerinde kireç oluşumunu önler.

### Kullanım Alanları

**Thermoton Clear**, dezenfeksiyon ve temizleme makinelerinde makine üreticisinin talimatlarına göre **termolabil ve termostabil tıbbi aletler ve materyallerinin ana temizliği ve dezenfeksiyonundan sonraki durulama ve parlatma** işlemi için tavsiye edilir.

**Thermoton Clear**, ayrıca kemotermik temizleme, dezenfeksiyon ve termik hasta atığı yıkama makinelerinin ( sürgü yıkama makinesi ) kireçten arındırılması için de kullanımı uygundur.

### Kullanım Şekli

Materyalleri tavsiyelere uygun olarak (Örn: hijyen planı) makineye yerleştiriniz. Bütün yüzeyler ve boşluklar makine dezenfeksiyonu ve temizliği için uygun olmalıdır. **Thermoton Clear**'i ana temizlemeden sonraki temizlik işlemi için makine üreticilerinin talimatlarına uygun olarak ilave ediniz.

Dikkat!!! (Program ayarlarına dikkat ediniz.)  
Dozajlama 30°C'den itibaren.

### Bileşimi

Sitrik asit, Alkol, Tensit  
Korozyon inhibitörleri içerir.

İthalatçı Firma:

 **DESOMED** EURO  
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Dr. Tappan GmbH joint venture kuruluşudur.  
Tire Organize Sanayi Bölgesi  
İbni Melek OSB Mah. Yol 5  
Sokak No:42 Tire/İZMİR

Tel: 0232-853 97 17  
[www.desomedeuro.com](http://www.desomedeuro.com)  
E-mail: [info@desomedeuro.com](mailto:info@desomedeuro.com)

CE

### Kimyasal ve Fiziksel Verileri

Konsantrenin görünümü : berrak, renksiz çözelti  
pH değeri konsantre çözelti : 2+/- 0,5  
Yoğunluk (20 C'de) : 1,045g/ml

### Kullanım Konsantrasyonu

Makine su sertliğine ve makine tipine göre  
1-3ml/L

Üreticinin talimatına bakınız. (%0,1-0,3)

**Makinelerinde hasta atığı dezenfeksiyonunda  
Makine üreticisinin talimatlarına uyunuz.**

### Önemli Uyarılar

Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Gözlerle temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

### Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
5-litre PE bidonu	3 x 5 litre

### Dozajlama Yardımcıları

Bidon aktarma musluğu, bidon için dozaj pompası

### Listeleme

\*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.  
\*Ulusal Mevzuata göre Deterjan Bildirimi yapılmıştır.



Üretici Firma:

Dr. Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3 D 34323  
Malsfeld/Almanya  
Tel.: +049-5664-9496-0